


Istme paigaldamine:

Aseta iste raamile. Suru iste kindlalt paika. Kontrolli, tõstes tooli istme alt, et see on kindlalt raami külge kinnitatud. Dušitooli esiäär on näidatud parempoolse pildi esiplaanil.

MÄRKUS!


* Välti istumist istme ääres, et iste raamist ära ei libiseks!

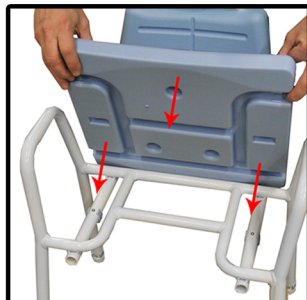

Kõrguse reguleerimine:


Eemalda raami jalgadelt kiirlukustid. Tõmba kõrguse reguleerimise jalga raami sisse. Vali sobiv kõrgus ja lukusta jalg raami külge, surudes kiirlukustid tagasi oma kohale.

* Veendu, et kiirlukustid oleksid õigesti kinnitatud ja läbistaksid täielikult mõlemad torud.

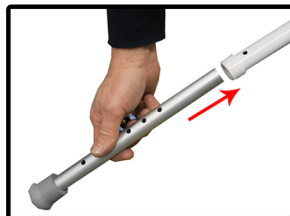

Kallutuse reguleerimine:

Üks jalgadest on kallutuse reguleerimise jalg, millel üldse kummist otsikut ei ole. Pöörates jalal olevat polsterdatud kruvi, saab tasandada duširuumi põranda võimaliku kalle.

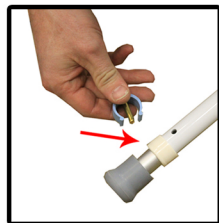

Seljatoe paigaldamine (lisavarustus):

Eemalda kiirlukustid seljatoelt. Sisesta seljatoe torud raami tagant (otse keskmise toru kaudu). Valida saab kahest erinevast sügavusest. Vali endale sobiv ja kinnita seljatugi raami külge kiirlukustidega.

* Veendu, et kiirlukustid oleksid õigesti kinnitatud ja läbistaksid täielikult mõlemad torud.



Põhjalikumaid kasutusjuhendeid leiad siit:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

Vaata kasutuselevõtu videot YouTube'is:



Kontrolli regulaarselt toote üldist seisukorda ja lukustite tugevust. Hoia toode puhtana, pühkides seda niiske lapiga ja õrna puhastusvahendiga, et see püsiks heas korras. Vigase toote korral lase see hooldada oma abivahendite teeninduskohas!

Edasimüüja Eestis: ITAK OÜ | www.itak.ee | info@itak.ee



Tukimet Oy | Rauma, Soome | www.tukimet.fi | tukimet@tukimet.fi

